



Stap 1

Maak de wond goed schoon. Zorg dat de wondranden goed te approximeren zijn. Dek het gesloten oog af met een gaas.

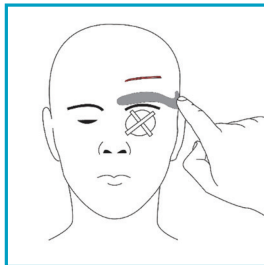


Stap 2

Door een vette zalf als Vaseline rond het oog aan te brengen, wordt een extra barrière aangebracht, die voorkomt dat wondlijm in het oog komt.

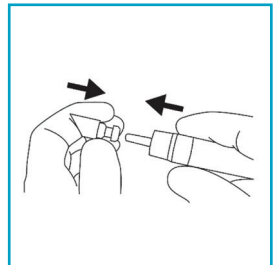


Stap 3

Breng desgewenst het penseel aan.

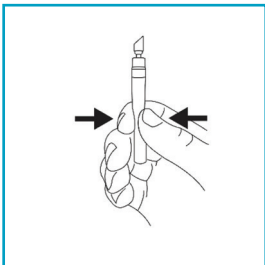

Stap 4

Houd de Indermil[®] Flexifuze™ met het penseel omhoog (richt niet op personen) en breek de glas ampul tussen duim en wijsvinger.

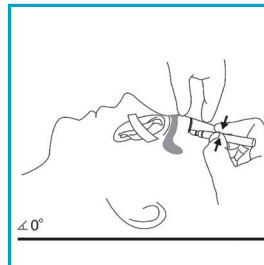

Stap 5

Approximeer de wondranden en breng een dunne laag lijm over de wond aan. De ampul bevat 0.75ml genoeg voor 20cm wondsluiting.

Indermil[®] Flexifuze™ is niet bedoeld om op het oog aangebracht te worden. Mocht het oog toch dichtgelijmd zijn, maak dan de oogleden en wimpers los door een warm kompres op het oog te leggen. De wondlijm zal hechten aan de proteïnen op het oog, wat de traanproductie op gang brengt. Dit zal helpen de lijm sneller los weken. Houd het kompres op het oog tot dat de lijm volledig heeft losgelaten, meestal tussen de 1 en 3 dagen. Probeer het oog niet geforceerd te openen. Mocht er lijm achterblijven op het oog neem dan contact op met de oogarts.