

Gebruik Indermil® flexifuze™ in 4 makkelijke stappen:




Stap 1

Haal de Indermil® Flexifuze™ uit de verpakking en plaats het penseel (wanneer nodig).



Stap 2

Houd de Indermil® Flexifuze™ met het penseel omhoog (richt niet op personen) en breek de glasampul tussen duim en wijsvinger.

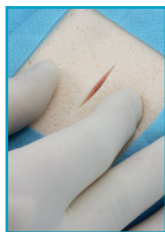

Stap 3

Approximeer de wondranden.



Stap 4

Lijm de wond met een dunne lijmfilm door de Indermil onder lichte druk met duim en wijsvinger in te knijpen. Houd de wondranden tegen elkaar tot de lijm droog is. De ampul bevat 0.75ml, genoeg voor 20cm wondsluiting.